

KLAUSOS APARATAI

MODELIS - GENESIS AI

NAUDOTOJO VADOVAS

Belaidžiai Produktai

CIC (Visiškai Kanale)*

Ne Belaidžiai Produktai

IIC NW (Nematomas Kanale)**

CIC NW (Visiškai Kanale)**

Jkraunami Produktai

ITC R (Kanale Jkraunamas)***

HS R (Pusės Kriauklės Jkraunamas)***

ITE R (Ausyje Jkraunamas)***

1. BŪTINA KLAUSOS APARATO INFORMACIJA

ATSARGUMAS: Tai nėra klausos apsauga.

ISPĖJIMAS: Asmenys jaunesni nei 18 metų reikalauja specializuotos priežiūros, ir naudojimas be medicinio įvertinimo gali pabloginti negalą ar sutrikimų. Klausos aparato vartotojas, jaunesnis nei 18 metų, turėtų turėti neseniai atliktą medicininį įvertinimą pas gydytoją, pageidautina ausų, nosies ir gerklių gydytoją (ENT). Prieš naudojant šį įrenginį, gydytojas turėtų nustatyti, ar klausos aparato naudojimas yra tinkamas.

Tarptautinis Naudojimas

Jūsų klausos aparatai patvirtinti veikti radio dažniu, kuris yra būdingas jūsų šaliai ar regionui, ir gali būti nepatvirtinti naudojimu už jūsų šalies ar regiono ribų. Turėkite omenyje, kad naudojimas tarptautinių kelionių metu gali sukelti trukdžius kiti elektroninei įrangai, arba kita elektroninė įranga gali trukdyti jūsų klausos aparatams.

Pagal reglamentus privalome pateikti šiuos įspėjimus:

ISPĖJIMAS: Belaidžių klausos aparaty naudojimas šalia kitos elektroninės įrangos turėtų būti vengiamas, nes tai gali sukelti netinkamą veikimą. Jei tokio naudojimo išvengti neįmanoma, atkreipkite dėmesį, ar jūsų klausos aparatai ir kita įranga veikia normaliai.

ISPĖJIMAS: Naudojimas priedų, komponentų ar atsarginių dalių, kurios nėra tiekiamos jūsų klausos aparatų gamintojo, gali padidinti elektromagnetinį išskyros lygįus ir sumažinti elektromagnetinį imunitetą, o tai gali sukelti veikimo pablogėjimą.

ISPĖJIMAS: Jei nešiojami radio dažnio ryšių įreginiai naudojami arčiau nei 30 cm (12 col.) nuo jūsų klausos aparato, gali pablogėti jūsų klausos aparato veikimas. Jei tai įvyksta, pasitraukite toliau nuo ryšių įrangos.

ISPĖJIMAS: Klausos aparato stabilumas sukurtas normaliam naudojimui. Venkite fizinio poveikio ausiai dėvint klausos aparatą, kuris gali sukelti įrenginio sugedimą ar jo dalių atskyrimą. Tai gali sukelti ausies kanalo įbrėžimus ar ausies būgnelio perforaciją. Jei tai įvyksta, labai rekomenduojama kreiptis į gydytoją dėl įvertinimo ir saugaus pašalinimo.

ISPĖJIMAS: Jei klausos aparatas nukrenta ant kieto paviršiaus, jis gali sugesti arba būti pažeistas. Tai apima mechaninį pažeidimą ar smūgį įrenginiui. Prieš dedant į ausį įsitikinkite, kad klausos aparatas yra nepažeistas. Jei pastebite, kad įrenginys yra pažeistas, nutraukite jo naudojimą ir kreipkitės į savo klausos specialistą.

ISPĖJIMAS:

Pakartotinė akprova, veikianti išėmimo rankenėlę, gali ją sulaužyti. Jei išėmimo rankenėlė lūžta ir jūs negalite atsargiai pašalinti įrenginio, rekomenduojama kreiptis į gydytoją, kad jis saugiai pašalintų įrenginį.

ISPĖJIMAS:

Naudojant bet kokį garso generuojantį tinito terapijos įrenginį, gali kilti tam tikrų rūpesčių. Tarp jų yra:

- Tinito pablogėjimo galimybė.
- Galimas klausos slenksčių pasikeitimas.
- Galimas odos sudirginimas kontaktinėje vietoje su klausos aparatu.

Multiflex Tinituso Technologija buvo sukurta siekiant sumažinti šiuos rūpesčius. Tačiau, jei patiriate arba pastebite bet kurią iš aukščiau nurodytų būklių ar bet koki sąvaigimą, pykinimą, galvos skausmus ar širdies plakimą, turėtumėte nedelsiant nutraukti klausos aparato naudojimą ir kreiptis į gydytoją, audiologą ar kitą klausos priežiūros specialistą.

Kaip ir naudojant bet kurį klausos aparatą, netinkamas tinito terapijos įrenginio naudojimas gali sukelti potencialiai žalingus poveikius. Reikia užtikrinti, kad įrenginys būtų naudojamas neleistinai ir kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams ir gyvūnams.

ISPĖJIMAS: Tai nėra klausos apsauga.

- Turėtumėte pašalinti šį įrenginį, jei patiriate pernelyg garsius garsus, nesvarbu, ar jie yra trumpalaikiai, ar ilgalaikiai. Jei esate triukšmingoje vietoje, turėtumėte naudoti tinkamą klausos apsaugą, o ne dėvėti šį įrenginį. Apskritai, jei triukšmingoje vietoje naudotumėte ausų kištukus, turėtumėte pašalinti šį įrenginį ir naudoti ausų kištukus.

ISPĖJIMAS: Garso išvestis neturėtų būti nemaloni ar skausminga.

- Turėtumėte sumažinti garsumą arba pašalinti įrenginį, jei garso išvestis yra nemaloniai garsiai ar skausminga. Jei nuolat reikia sumažinti garsumą, gali reikėti papildomai sureguliuoti jūsų įrenginį.

ISPĖJIMAS: Gali prireikti medicininės pagalbos, jei dalis įstrigę jūsų ausyje.

- Jei bet kuri klausos aparato dalis, pavyzdžiui, ausų galuikas, įstrigę jūsų ausyje ir jūs negalite lengvai jos pašalinti pirštais, kuo greičiau kreipkitės į medicininę pagalbą. Neturėtumėte bandyti naudoti pinceto ar medvilnės tamponų, nes jie gali stumti dalį toliau į ausį, pažeidimai ausies būgnelį ar ausies kanalą, galbūt rimtai.

PASTABA: Ką galite tikėtis pradėję naudoti klausos aparatą.

Klausos aparatai gali būti naudingi daugeliui žmonių, turinčių klausos praradimą. Tačiau turėtumėte žinoti, kad jie negrąžins normalios klausos, ir jūs vis tiek galite turėti sunkumų girdėdami triukšmingoje aplinkoje. Be to, klausos aparatas neustabdys ar nepažerins medicininės būklės, sukeliančios klausos praradimą. Žmonėms, kurie pradeda naudoti klausos aparatus, kartais prireikia kelių savaitių, kad prie jų priprastų. Panašiai, daugelis žmonių mano, kad mokymai ar konsultacijos gali padėti jiems geriau išnaudoti savo įrenginius.

Jei turite klausos praradimą abiejose ausyse, galite gauti daugiau naudos naudodami klausos aparatus abiejose ausyse, ypač situacijose, kuriose klausymasis yra išvargina, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje.

1. KLAUSOS APARATAI

CIC apžvalga

- Naudotojo valdymas (pasirenkamas)
- Mikrofonas ir dangtelis
- Ventiliacija
- Ausų sijos apsauga (pridedamas priedas) ir garso išvestis
- Serijos numeris
- Pusės indikatorius (vieta gali skirtis): MELYNA yra kairė ausis, RAUDONA yra dešinė ausis
- Baltas taškas nurodo klausos aparato viršų
- Išėmimo rankenėlė su antena (nepašalinti, nepajauti ar ne keisti)
- Baterijos skyrius

IIC NW, CIC NW apžvalga

- Programavimu išdžs klausos priežiūros specialistui
- Mikrofonas ir dangtelis
- Baterijos skyrius
- Išėmimo rankenėlė
- Ventiliacija
- Pusės indikatorius (vietovė gali skirtis): RAUDONA yra dešinė ausis, MELYNA yra kairė ausis
- Ausų sijos apsauga (pridedamas priedas) ir garso išvestis
- Baltas taškas nurodo klausos aparato viršų (tik IIC NW)
- Serijos numeris
- Naudotojo valdymas (tik CIC NW, pasirenkamas)

ITC/HS R; ITE R apžvalga

- Naudotojo valdymas (pasirenkamas)
- Mikrofonas
- Įkrovimo kontaktai
- Sukamasis garsumo valdymas (pasirenkamas)
- Ventiliacija
- Ausų sijos apsauga (pridedamas priedas) ir garso išvestis
- Serijos numeris
- Pusės indikatorius (vieta gali skirtis): RAUDONA yra dešinė ausis, MELYNA yra kairė ausis

Naudotojo valdymo parinktys***



Be valdymo Naudotojo valdymas Sukamasis garsumo valdymas

2. NAUDOKITE SAVO KLAUSOS APARATUS

Baterijos* **

1 ŽINGSNIS: Įdėkite klausos aparato baterijas

Jūsų klausos aparatas veikia su baterija. Raskite savo baterijos dydį pagal spalvų kodą ant pakotinės – ruda (312) arba geltona (10)**.

Norėdami įdėti arba pakeisti bateriją:

- Naudodami piršto nagą, švelniai atidarykite baterijos dureles.
- Išimkite seną bateriją.
- Nuimkite spalvotą lipduką nuo naujos baterijos. Palaukite 3–5 minutes.
- Įdėkite bateriją į baterijos dureles, įsitikindami, kad „+“ ant plokščiosios baterijos pusės sutampa su „+“ ant baterijos durelių.
- Uždarykite baterijos dureles.

Naudingi patarimai dėl baterijų

- Kad išvengtumėte pažeidimų, stenkitės neprieivartauti baterijos durelių uždarymo ar per daug jų neatidarykite.

- Jei baterijos durelės neužsidaro tinkamai, patikrinkite, ar teisingai įdėjote bateriją.
- Panaudotas baterijas išmeskite iš karto į tinkamą atliekų ar perdirbimo konteinerį.
- Baterijos gali skirtis. Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl klausimų apie baterijos veikimo laiką arba tinkamą baterijos dydį ir tipą jūsų klausos aparatams.

ISPĖJIMAI

Baterijos gali būti pavojingos, jei jas prarysite. Kad to išvengtumėte:

- Laikykite baterijas nepasiekiamoje vietoje vaikams ir naminiams gyvūnams.
- Prieš vartodami vaistus, patikrinkite juos dukart. Baterijos gali būti supainiotos su tabletėmis.
- Nedėkite baterijų į burną.

Įjungimas: Įdėkite bateriją ir visiškai uždarykite baterijos dureles. Jūsų klausos aparatas turi įjungimo vėlavimą, kuris gali trukti kelias sekundes. Gali pasigirsti signalas, rodantis, kad jūsų klausos aparatas yra įjungtas.

Įkraukite savo klausos aparatus***

Pasirinkite įkroviklį:

- ☐ Individualus įkroviklis
- ☐ Premium individualus įkroviklis

Prieš naudodami klausos aparatus pirmą kartą, pilnai įkraukite juos.

2 ŽINGSNIS: Užsidėkite savo klausos aparatus

1. Laikydami klausos aparato išorinius kraštus, švelniai įdėkite kanalo galuiką į ausies kanalą ir pasukite klausos aparatą atgal.

2. Švelniai įspauskite klausos aparatą į vietą. Baigta!

3 ŽINGSNIS: Išimkite savo klausos aparatus

- Laikykite klausos aparato išorinius kraštus.
- Pasukite klausos aparatą į priekį ir traukite išorėn. ARBA Jei jūsų klausos aparatas turi išėmimo rankenėlę: laikykite ją ir švelniai ištraukite klausos aparatą iš ausies.

Išjungimas*

Atidarykite baterijos dureles, kol baterija nebebus liečiama su kontaktais.

Automatinis įjungimas/išjungimas*

Jūsų klausos aparatas gali turėti galimybę automatiškai pereiti į mažo galingumo būseną, kad taupytų bateriją. Šį valdiklį gali sukonfigūruoti jūsų klausos priežiūros specialistas arba Jūs pats per klausos aparato mobiliąją programėlę. Padėkite klausos aparatą ant lygaus, stabilaus paviršiaus (pvz., stalo), ir jis po maždaug 15 minučių pereis į mažo galingumo būseną. Norėdami atkurti normalų klausos aparato veikimą, pakelkite klausos aparatą ir įdėkite jį į ausį. Jūsų klausos aparatas aptiks šį judesį ir vėl įsijungs. Gali pasigirsti signalas, rodantis, kad jūsų klausos aparatas yra įjungtas.

Maitinimo įjungimas/išjungimas***

Girdėsite signalą per savo klausos aparatą, kai jį įjungsite arba išjungsite:

- Įjungimo indikatorius – tonų serija, didėjanti pagal aukštį.
- Išjungimo indikatorius – tonų serija, mažėjanti pagal aukštį.

Įjunkite/išjunkite klausos aparatus naudodami įkroviklį arba naudotojo valdiklį.

Baterijos indikatoriai

- Žemas baterijos lygis: pasigirs signalas arba bus ištartas žodis „baterija“ (*angl. – battery*)*** kai baterijos įtampa bus maža.

PASTABA: Laikas tarp žemos baterijos indikatoriaus ir išjungimo gali skirtis priklausomai nuo aplinkos triukšmo lygio ir jūsų produkto naudojimo.

Baterijos išjungimas: indikatorius taip pat gali pasigirsti prieš pat baterijos veikimo pabaigą.

Tikėtinas baterijos veikimo laikas

Baterijos veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo belaidžio ryšio naudojimo.

CIC

- Be srautinio perdavimo: iki 8 dienų
- Su srautiniu perdavimu: iki 7 dienų

IIC NW

- 10 baterijų: 5-7 dienos

CIC NW

- 10 baterijų: 5-7 dienos
- 312 baterija: 8-10 dienų

ITC/HS R

- Be srautinio perdavimo: iki 42 valandų
- Su srautiniu perdavimu: iki 36 valandų

ITE R

- Be srautinio perdavimo: iki 42 valandų
- Su srautiniu perdavimu: iki 36 valandų

Naudotojo valdymas (pasirenkamas)

Jūsų klausos aparato naudotojo valdymas leidžia rankiniu būdu valdyti jūsų klausos aparatus. Tai sukonfigūruoja jūsų klausos priežiūros specialistas.

Jūsų naudotojo valdymas veikia 3 būdais:

- Trumpas paspaudimas: Paspauskite naudotojo valdymą 1 sekundę ir atleiskite.
- Ilgas paspaudimas: Paspauskite ir laikykite naudotojo valdymą 3 sekundes ar ilgiau.
- Bakstelėjimo valdymas* ***. Tvirtai dukart bakstelėti ant arba šalia naudotojo valdymo ant jūsų klausos aparato.

Naudotojo valdymas	Išmanoji funkcija
Trumpas paspaudimas (1 sekundė)	
Ilgas paspaudimas (3 sekundės)	
Bakstelėjimo valdymas* ***	

Telefoniniai skambučiai ir klausos aparatai* ***

Jūsų klausos aparatai sukurti taip, kad būtų patogų priimti skambučius per mobiliųjį ar laidinį telefoną.

- Laidinio telefono skambučiai

Norėdami naudoti laidinį telefoną dėvėdami klausos aparatus, pasitarkite su savo klausos priežiūros specialistu. Jie gali padėti nustatyti „telefono“ nustatymą jūsų klausos aparatuose ir pateikti patarimų.

- Mobiliojo telefono skambučiai

Norėdami transliuoti mobiliojo telefono skambučius į savo klausos aparatus, žr. priedamą „Suderinamos mobiliosios programėlės nustatymo“ vadovą. Tai parodo, kaip prijungti („susieti“) jūsų išmanųjį telefoną su jūsų klausos aparatais.

3. KLAUSOS APARATŲ PRIEŽIŪRA

Laikykite savo klausos aparatą švarų. Karštis, drėgmė ir svetimos medžiagos gali sumažinti veikimą.

- Nevalykite naudodami vandenį, tirpiklius, valymo skysčius ar aliejus. Neardykite savo klausos aparato ir neikiškite valymo įrankių į vidų.
- Naudodami valymo įrankį, esantį dėkle, šepčiu ar šluoste nuvalykite nešvarumus nuo mikrofono, ausų sijos apsaugos ir garso išvesties.
- Kasdien valykite klausos aparatus ant minkšto audinio, kad išvengtumėte pažeidimų, jei jie nukristų ant kieto paviršiaus. Jei klausos aparatas nukrenta ant kieto paviršiaus, tai gali sukelti korpuso ar apvalkalo lūžimą ir/ar pažeidimą. Tai apima mechaninį poveikį ar smūgį įrenginiui.

Laikymo patarimai

Kai nenešiojate savo klausos aparatų, apsaugokite juos nuo pažeidimų naudodamiesi šiais laikymo patarimais:

- Pasirinkite vėsią, sausą vietą, toli nuo karščio ir drėgmės. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Užtikrinkite, kad lengvai rastumėte savo klausos aparatus, bet jie nebūtų pasiekiami vaikams ir naminiams gyvūnams. Naktinė spintelė ar komoda yra puiki vieta.

Daugiau laikymo patarimų kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Mikrofono dangtelio valymas Individualus mikrofono dangtelis jūsų klausos aparate apsaugo mikrofoną nuo ausų sijos ir nešvarumų. Pasitarkite su savo klausos priežiūros specialistu dėl valymo ir priežiūros instrukcijų.

Ausų sijos apsaugų keitimas

Ausų sijos apsaugas neleidžia ausy sieri ai kauptis jūsų klausos aparate. Jei pastebite sukauptus nešvaru- nus arba prastą garšą iš jūsų klausos aparato, geriausia pakeisti sijos apsaugą.

Norėdami pakeisti sijos apsaugas:

- Įdėkite luščią aplikatoriaus lazdelę galį tiesiai į naudojamą sijos apsaugą jūsų klausos aparate. Tvirtai spauskite.
- Traukite aplikatoriaus lazdelę tiesiai. Ištraukite, kad pašalintumėte naudojamą sijos apsaugą. Nesukite.
- Naudokite priešingą aplikatoriaus lazdelės galą, kad įdėtumėte naują sijos apsaugą tiesiai į klausos aparatą. Tvirtai spauskite.
- Tiesiai ištraukite aplikatoriaus lazdelę. Nesukite. Išmeskite aplikatoriaus lazdelę. Baigta!

4. PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMO VADOVAS

Jei dėl kokios nors priežasties jūsų klausos aparatas neveikia tinkamai, NENAUDOKITE bandyti jo taisyti pats. Ne tik galite pažeisti galiojančias garantijas ar draudimą, bet ir galite lengvai sukelti papildomų pažeidimų.

Jei jūsų klausos aparatas neveikia ar veikia prastai, patikrinkite šį problemų sprendimo vadovą galimiems sprendimams. Jei problemos tęsiasi, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl patarimų ir pagalbos. Daugelis bendrų problemų gali būti išspręstos jūsų klausos priežiūros specialisto kabinete ar klinikoje.

Probleminių situacijų sprendimo vadovas

SIMPTOMAS	Galimos priežastys	Sprendimai
Klausos aparatai nėra pakankamai garsūs.	Užblokuotas mikrofonas arba sijos apsauga ir garso išvestis.	1. Išvalykite klausos aparatus. 2. Jei reikia, pakeiskite sijos apsaugas.
Nuolaužų susikaupimas.	Valymo įrankių šepėtuolių nuvalykite mikrofoną, taip pat sijos apsaugą ir garso išleidimo angą.	
Klausos pasikeitimas.	Susisiekite su savo klausos priežiūros specialistu.	
Senka baterija.* **		Pakeisti bateriją.
Nenuoseklus klausos aparato veikimas.	Užblokuotas mikrofonas arba sijos apsauga ir garso išvestis.	1. Išvalykite klausos aparatus. 2. Jei reikia, pakeiskite sijos apsaugas.
	Reikia paleisti iš naujo****.	1. Atidarykite akumuliatoriaus dureles, kol akumuliatorius nebebus prie akumuliatoriaus kontakto. 2. Saugiai uždarykite akumuliatoriaus dureles.
Senka baterija*.		Pakeisti bateriją.
Neaiškus ir iškreiptas klausos aparato veikimas.	Užblokuotas mikrofonas arba sijos apsauga ir garso išvestis.	1. Išvalykite klausos aparatus. 2. Jei reikia, pakeiskite sijos apsaugas.
	Senka baterija*.	Pakeisti bateriją.
	Išsikrovęs akumuliatorius**.	Pakeiskite bateriją.
Sugedę klausos aparatai**.	Susisiekite su savo klausos priežiūros specialistu.	
Reikia įkrauti****.	Klausos aparatus dėkite į įkroviklį, kol įkroviklio indikatoriaus lemputės pradės mirksėti į nuolatinę šviesą.	

5. KRITIMO ĮSPĖJIMO FUNKCIJA

Kritimo įspėjimo funkcija gali būti naudojama informuoti kitus asmenis, jei jūs nukrentate ar patiriate nesusijusį su kritimu įvykį. Ši funkcija gali būti sukonfigūruota siųsti SMS tekstinius pranešimus iš anksto nustatytiems kontaktams. Kritimo įspėjimą galima sukonfigūruoti siųsti automatinius ir/arba rankiniu būdu inicijuojamus pranešimus.

ISPĖJIMAI:

- Automatinis įspėjimas gali neaptikti 100 procentų kritimo.
- Sumažinus Automatinio įspėjimo jautrumą, kai kurie kritimai gali būti neaptikti jūsų Kritimo Įspėjimo sistemos.*** Pavyzdžiui, gali neaptikti kritimo, jei:
 - Jautrumo nustatymas nėra tinkamas naudotojiui.
 - Kritimas yra labai lėtas arba jūs stystate žemyn palaipsniui.
 - Jūs pakilote ir pradėjote vaikščioti iškart po kritimo.

Automatinis įspėjimas gali inicijuoti klaidingus įspėjimus.

Norėdami išvengti klaidingų tekstinių pranešimų siuntimo jūsų kontaktams, galite atsaukti įspėjimą iš savo išmaniojo telefono arba paspaudę naudotojo valdikį ant bet kurio klausos aparato.

Norėdami sumažinti Kritimo Įspėjimo ryšio klaidų tikimybę:

- Jūsų klausos aparatas (-ai) turi būti įjungti, sujungti ir susieti su jūsų išmaniuoju telefonu naudojant Bluetooth® ryšį.
- Mobilūsį įrenginys turi būti įjungtas, o klausos aparato mobilioji programa turi būti atidaryta (fone arba uždaryta).
- Mobilūsį įrenginys turi turėti interneto ryšį (per mobiliųjų tinklų arba WiFi).

PASTABA:

- Jaunesni nei 18 metų asmenys turėtų pirmiausia pasikonsultuoti su gydytoju, pageidautina su ausų, nosies ir gerklių gydytoju (LOR), nes jų poreikiai gali skirtis nuo suaugusiųjų.
- Gydytojas nustatys ir gydys medicininės būklės pagal poreikį.

- Gydytojas gali nukreipti asmenį pas audiologą atlikti atskrąją testą, klausos aparato įvertinimą.
- Klausos aparato įvertinimas padės audiologui pasirinkti ir pritaikyti tinkamą klausos aparatą.

Asmuo, jaunesnis nei 18 metų, turintis klausos praradimą, prieš perkdamas klausos aparatą turėtų atlikti medicininį įvertinimą pas gydytoją, pageidautina LOR specialistą. Medicininio įvertinimo tikslas yra nustatyti ir gydyti medicininės būklės, kurios gali paveikti klausą, tačiau kurių klausos aparatas pats neišgydys.

Po medicininio įvertinimo ir jei tinkama, gydytojas pateiks raštišką pareiškimą, kad klausos praradimas buvo mediciniškai įvertintas ir asmuo yra kandidatas naudoti klausos aparatą. Gydytojas gali nukreipti asmenį pas audiologą klausos aparato įvertinimui, kuris skiriasi nuo medicininio įvertinimo ir yra skirtas tinkamo klausos aparato nustatymui.

Audiologas atliks klausos aparato įvertinimą, kad įvertintų asmens gebėjimą girdėti su ir be klausos aparato. Tai leis audiologui parinkti ir pritaikyti klausos aparatą pagal asmens individualius poreikius. Audiologas taip pat gali teikti įvertinimą ir reabilitaciją, nes jaunesniems nei 18 metų asmenims klausos praradimas gali su- kelti problemų kalbos vystymuisi, švietimo ir socialinėje srityse. Audiologas yra kvalifikuotas pagal mokymą ir patirtį padėti jaunesniems nei 18 metų asmenims įvertinti ir reabilituoti klausos praradimą.

6. SAUGOS INFORMACIJA

PASKIRTIS: Oro laidumo klausos aparatas yra nešiojamas garso stiprinimo prietaisas, skirtas kompensuoti susilpnėjusią klausą. Klausos aparatai yra prireiami įvairiais stiprinimo/išėjimo lygiais, tinkamais gydyti nuo lengvų iki labai sunkių klausos netekimų.