

KLAUSOS APARATAI
MODELIS - EVOLV AI
NAUDOJIMO VADOVAS
RIC (su imtuvu ausies kanale*) mRIC (micro su imtuvu ausies kanale*) RIC (su imtuvu ausies kanale*) kraunamas *** BTE (su imtuvu už ausies)** BTE (su imtuvu už ausies) kraunamas****

1. KLAUSOS APARATŲ APŽVALGA:

RIC (su imtuvu ausies kanale*)	BTE (su imtuvu už ausies)**
mRIC (micro su imtuvu ausies kanale*)	
BTE (su imtuvu už ausies)	RIC (su imtuvu ausies kanale) kraunamas***

Spaudžiamas dvipusis jungiklis RIC 312 apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas**

- Klausos aparatas
- Laidas
- Imtuvas
- Mikrofonas
- Spaudžiamas dvipusis jungiklis (naudooto valdymas)
- Akumuliatoriaus skyrelis (jungimo/išjungimo valdymas), serijos numerio vieta
- Gaminčio pavadinimo ir modelio pavadinimo vieta
- Kairės/dešinės pusės imtuvo indikatoriaus vieta
- Priglundančios ausinės
- Kairės/dešinės pusės klausos aparato indikatoriaus vieta
- Individualaus ausų įdėklas (pasirinktinai)
- RIC pasirinktinis maitinimo ausų įdėklas (pasirinktinai)
- Atraminis užraktas

Spaudžiamas mygtukas mRIC 312 apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas**

- Klausos aparatas
- Laidas
- Imtuvas
- Mikrofonas
- Spaudžiamas mygtukas (naudooto valdymas)
- Baterijos skyrelis (jungimo/išjungimo valdymas), serijos numerio vieta
- Gaminčio pavadinimo ir modelio pavadinimo vieta
- Kairės/dešinės pusės imtuvo indikatoriaus vieta
- Priglundančios ausinės
- Kairės/dešinės pusės klausos aparato indikatoriaus vieta
- Individualaus ausų įdėklas (pasirinktinai)
- RIC pasirinktinis maitinimo ausų įdėklas (pasirinktinai)
- Atraminis užraktas

BTE 13 apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas **

- Klausos aparatas
- Ausies lankelis
- Mikrofonas
- Spaudžiamas dvipusis jungiklis (naudooto valdymas)
- Baterijos skyrius (jungimo/išjungimo valdiklis)
- Kairės/dešinės pusės klausos aparato indikatoriaus vieta,
- RAUDONA skirta dešinei ausiai, MELNYA - kairai ausiai
- Serijos numerio vieta
- Gaminčio pavadinimo ir modelio pavadinimo vieta
- Individualus ausies įdėklas su vamzdeliais
- Plonas vamzdelis su patogia ausine
- Plonas vamzdelis su individualiu ausies įdėku

Spaudžiamas dvipusis jungiklis kraunamas RIC apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas***

- Klausos aparatas
- Laidas
- Imtuvas
- Mikrofonas
- Spaudžiamas dvipusis jungiklis (naudooto valdymas)
- Kairės/dešinės pusės klausos aparato indikatoriaus vieta,
- RAUDONA skirta, dešinei ausiai, MELNYA, skirta kairiai ausiai
- Serijos numerio vieta
- Gaminčio pavadinimo ir modelio pavadinimo vieta
- Individualus ausies įdėklas su patogia ausine
- Plonas vamzdelis su patogiu ausine
- Plonas vamzdelis su individualiu ausies įdėku

Spaudžiamas jungiklis kraunamas BTE apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas****

Jūsų klausos aparato valdikliai yra šie:

- Ausies lankelis
- Mikrofonas
- Spaudžiamas mygtukas (naudooto valdymas)
- Kairės/dešinės pusės indikatoriaus vieta, RAUDONA spalva skirta dešinei ausiai, MELNYA spalva - kairai ausiai

Jūsų klausos aparatą galima atpažinti pagal:

- Serijos numerio vietą
- Gaminčio pavadinimo ir modelio pavadinimo vietą
- Patogūs pritaikymo sprendimai:
- Standartinis ausies įdėklas su vamzdeliu
- Plonas vamzdelis su patogia ausine
- Plonas vamzdelis su individualiu ausies įdėku

Jroviklio apžvalga

Funkcijos, valdymas ir identifikavimas****

- Klausos aparato džiovinimo tabletės vieta
- Valymo šepetėlis
- Ausinių/ausų įdėko vieta
- Išrovimo jungtyje
- Klausos aparato įkrovimo šviesos diodai
- Įmontuoto akumuliatoriaus šviesos diodai (veikia tik „Premium Standard“ įroviklyje su įmontuotu akumuliatoriumi)
- „MicroUSB“ prievadas (standartinis įroviklis reikalauja, kad maitinimo laidas būtų prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio (pvz., sieninio lizdo))

2. PARUŠIMAS

Baterijos **

Jūsų klausos aparatas naudoja baterijas kaip maitinimo šaltinį. Baterijos dydį galima nustatyti pagal rudos (312) arba oranžinės (13**) spalvos kodą ant pakuočės.

Norėdami įdėti arba pakeisti bateriją:

- Baterijos dangtelį patraukite pirštu.
- Atsargiai atidarykite baterijos dangtelį ir išimkite senąją bateriją.

- Nuo naujos baterijos nuimkite spalvotą skirtuką. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, nuėmę skirtuką palaukite 3-5 minutes ir tik tada įdėkite bateriją.
- Įdėkite bateriją „+“ puse į viršų.
- Uždarykite baterijos dangtelį.

Baterijos indikatoriai **

Kai baterijos įtampa yra žema, pasigirsta indikatoriai. Baterijai pakeisti turite maždaug 30 minučių***. Prieš pat baterijai nusitįgiant veikti taip pat gal pasigirsti indikatoriai.

*** Faktinis laikas nuo išsikrovusios baterijos indikatoriaus iki išsijungimo priklauso nuo aplinkos triukšmo lygio ir naudojamos baterijos.

Naudingi patarimai **

- NIEKADA JĖGA NEBANDYKYTE UŽDARYTI BATERIJOS DANGTELIO, taip galite rimtai pakenkti. Jei dangtelis neuždaro lengvai, patikrinkite ar teisingai įdėta baterija.

- Neatidarykite baterijos dangtelio per stipriai, kaip galėtumėte jį pažesėti.
- Panaudotas baterijas nedelsdami išmeskite į tinkamą atliekų arba perdirbimo konteinerį.

- Baterijos skiriamos dydžių ir veikimu. Klausos specialistas yra geriausias šaltinis, iš kurio galite sužinoti baterijos

naudojimo trukmę ir patikrinti, ar naudojate tinkamo dydžio ir tipo baterijas.

ISPĖJIMAS ** **

Baterijos yra pavojingos, jei jos nuryjamos. Siekiami padėti išvengti atsitiktinio baterijų prarijimo:

- Laikykite šias vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Prieš vartodami vaistus, patikrinkite juos - baterijos klaidingai painiojamos su tabletėmis.

Niekada nedėkite baterijų į burną, nes jas galima lengvai praryti.

Klausos aparato įkrovimas***

- Įdėkite klausos aparatą į įroviklį taip, kad ausinės būtų įdėtos į dėklą.

- Klausos aparatas įkrovijus automatiškai ir bus pradas krauti, jei įroviklis bus jungtas;

- Standartiniam įrovikliui be įmontuoto akumuliatoriaus reikia išorinio maitinimo šaltinio (pvz., sieninio lizdo).

- Klausos aparatas automatiškai įsijungs, kai bus išimtas iš įroviklio. Standartiniam įrovikliui be įmontuotos baterijos reikia išorinio maitinimo šaltinio (pvz., sieninio lizdo).

Pastaba: Kiekvieną klausos aparatą atitinkantys šviesos diodai:

- Šviečia žalia – kraunama
- Žybsinti žalia – visiškai įkrautas (jei kraunate „Premium Standard“ įroviklį be laido, kraunant šviesos diodai išsijungs, kad būtų išsaugota įmontuoto akumuliatoriaus reikalauja, kad maitinimo laidas būtų jungtas į išorinį maitinimo šaltinį (pvz., sieninį lizdą))
- Mirkis raudonai – gedimas - išimkite iš įroviklio, palaukite, kol šviesos diodas išsijungs, ir vėl įdėkite krauti. Jei gedimo būseną tęsiasi, kreipkitės į klausos specialistą.

- Įkrovimas vyksta atidarius arba uždarius dangtį; jūsų klausos aparatai bus visiškai įkrauti per 3 ½ valandos (priklausu nuo modelio; standartinis įroviklis be įmontuoto akumuliatoriaus reikalauja, kad maitinimo laidas būtų jungtas į išorinį maitinimo šaltinį (pvz., sieninį lizdą))
- Jas saugu laikyti įroviklyje, kai jos visiškai įkrautos, ir bet kurio metu, kai jų nenešiojate.
- Jei klausos aparatų nenaudoosite ilgesnį laiką (pvz., kelias savaites), ištraukite kištuką iš įroviklio ir klausos aparatus iš įkrovimo prievadų. Turėsite rankiniu būdu išjungti klausos aparatus tris sekundes paspaudami svirties jungiklį. Galite juos laikyti rezervare.
- Džiovinčias bus veiksmingas 3-6 mėnesius, priklausomai nuo drėgmės klausos aparatuose ir oro drėgnumo. Spalva nuo mėlynos išbiks iki baltos, o tai reiškia, kad ji reikia pakeisti.

Tik "Premium Standard" įrovikliui su įmontuotu akumuliatoriumi:

- Kraunant be įroviklio laido, šviesos diodai išsijungs, kai Klausos aparatai bus visiškai įkrauti.
- Norėdami atnaujinti šviesos diodus, kai įroviklis neįjungtas, trims sekundėms išimkite klausos aparatą iš įkrovimo prievado ir vėl įdėkite į įroviklį (atnaujinimas trunka tik 10 sekundžių - tada šviesos diodai vėl išsijungs).

Įkrovimas "Premium Standard" įrovikliu ***

(Taikoma tik "Premium Standard" įrovikliui. Netaikoma standartiniam įrovikliui be įmontuoto akumuliatoriaus)

- Kai įroviklis prijungtas prie elektros tinklo ir visiškai įkrautas – šviečia 4 nuolat šviečiantys šviesos diodai.
- Kai kraunama be laido, šviesos diodai išsijungs po 10 sekundžių.
- Norėdami atnaujinti šviesos diodus, trims sekundėms išimkite klausos aparatą iš įkrovimo prievado ir vėl įdėkite į įroviklį (atnaujinimas trunka tik 10 sekundžių - tada šviesos diodai vėl išsijungs).
- Kraunant įmontuotą akumuliatorių patektu laidu, šviečia 4 šviesos diodai:
 - Žybsi įkvrimo metu
 - Šviečia, kai įkrautas

3. ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS**

Ausinių arba ausinių įdėko įdėjimas:

- Nykščiu ir rodomuoju pirštu laikykite laidą ties lenkimu priešais imtuvą. Švelniai įdėkite imtuvą į ausies kanalą.
- Apvyniokite klausos aparatą ant ausies viršaus ir atsargiai uždėkite jį už ausies.
- Įdėkite fiksiatorių į ausies kaušėlį.

Ausinių arba ausinių įdėko įdėjimas:

- Nuimkite fiksiatorių nuo ausies kaušelio.
- Nuimkite klausos aparatą nuo ausies.
- Nykščiu ir rodomuoju pirštu suimkite imtuvą. Švelniai ištraukite iš ausies kanalo.

Netaurkite klausos aparato korpuso, nes tai gali sugadinti jungtį.

4. ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS****

Individualaus ausies įdėko ir klausos aparato įdėjimas:

- Nykščiu ir rodomuoju pirštu laikykite individualų ausies įdėklą išorinėje pusėje ties vamzdeliais.
- Paleikite ranką šiek tiek į priekį ir švelniai įdėkite pritaikytą ausies įdėko kanalo galiuką į ausies kanalą.
- Pasukite individualų ausies įdėklą atgal.
- Pirštu galiuku švelniai prispauskite individualų ausies įdėklą.
- Atsargiai uždėkite BTE už ausies, apvyniodami ausies kablukų per ausies viršų.

Norėdami nuimti klausos aparatą ir individualų ausį įdėklą:
Paimkite klausos aparatą iš už ausies ir švelniai ištraukite individualų ausies įdėklą į šorę. Lengvai traukdami ausies senelę žemyn galite padėti atlaisvinti individualų ausies įdėklą, kai jis nuimamas.

Patogūs ausinės įdėjimas:

- Į ausies kanalą įdėkite patogią ausinę.
- Švelniai uždėkite BTE ant ausies, kol jis tvirtai laikysis už ausies.
- Įdėkite fiksiatorių į ausies kaušėlį.

Norėdami nuimti klausos aparatą ir patogią ausinę:

- Nuimkite fiksiatorių nuo ausies kaušelio.
- Nuimkite klausos aparatą nuo ausies.
- Švelniai suimkite vamzdelį ties ausies kanalo angą ir traukite į šorę.

Naudingi patarimai

- Gali atsirasti nedidelis dirginimas ir uždegimas, kol ausie pripranta prie joje esančio klausos aparato. Tokiu atveju kreipkitės į klausos specialistą. Yra kelių skirtingų dydžių ausinių ir pritaikytų ausų įdėklų, kurie gali būti patogesni.
- Jei iš tikrųjų pasireiškė alerginė reakcija, galima rinktis alternatyvias ausies įdėklų medžiagas, kreipkitės į klausos specialistą.
- Dėl stipraus patinimo, išsiskyri iš ausies, per didelio ausies sieros kiekio ar kitų neįprastų būklių būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

5. NAUDOJIMAS

Jungimas ir išjungimas **

Įdėkite bateriją ir uždarykite baterijos dangtelį. Jūsų klausos aparatas turi jungimo uždešinį, kuris gali užtrukti kelias sekundes. Galite išgirsti toną, rodantį, kad klausos aparatas jungtas.

Išjungimas:

Atidarykite baterijos dangtelį, kol baterija nebesiliečia prie baterijos kontaktų.

Jungimas ir išjungimas ****

Jungimas - išėjus klausos aparatą iš įroviklio, jis įsijungs automatiškai, jei įroviklis bus jungtas/kraunamas/jungtas į išorinį maitinimo šaltinį (pvz., sieninį elektros lizdą). Yra uždešinias, kuris subalansuoja jums laiko įdėti klausos aparatą į ausį. Jungimas - Jei klausos aparatas įsijungs rankiniu būdu, paspaudus viršutinę jungiklio dalį, jis bus jungtas. Įsijungimo uždešinias vis dar išlieka, kad turėtumėte laiko įsidėti klausos aparatą į ausį.

Išjungimas - Klausos aparatas automatiškai išsijungs, kai bus įdedamas į įkrovimo prievadą, kai įroviklis bus jungtas/prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio (pvz., sieninio lizdo). Įkrovimas bus tęsiamas.

Išjungimas - Klausos aparatą galima išjungti rankiniu būdu tris sekundes paspaudžiant viršutinį arba apatinį jungiklį.

Automatinis jungimas/išjungimas

Jūsų klausos aparatas gali palaikyti galimybę automatiškai pereiti į taupymo režimą, kad būtų taupoma baterija (Perejimas į taupymo režimą padeda taupyti baterijos naudojimą, kai naudojama su kraunamais klausos aparatais, kurie kraunami kasdien.). Šį valdymą gali sukonfigūruoti jūsų klausos specialistas arba su programėle „Thrivr Hearing Control“. Padėkite klausos aparatą ant lygaus, stabilaus paviršiaus (pvz., stalo) ausinėmis į viršų, ir maždaug po 15 minučių įsijaus į šį pereis į taupymo režimą. Norėdami pereiti į prastą klausos aparato veikimą, pakeikite klausos aparatą į įsidėkite jį į ausį. Klausos aparatas aptiks šį judesį ir vėl įsijungs. Galite išgirsti toną, rodantį, kad klausos aparatas jungtas.

Galimos naudojoto valdymo funkcijos

Klausos aparatas naudojoto valdymą gali reaguoti skirtingai, priklausomai nuo to, kiek laiko spaudžiate mygtuką.

Jūsų klausos aparatą gali turėti vieną funkciją, piskirtą trumpam paspaudimui (paspausti ir atleisti), ir vieną funkciją, piskirtą ilgam paspaudimui (paspausti ir laikyti). Toliau pasirinktos parinktys rodo, kaip sukonfigūruotas naudojoto valdymas.

Paskaitėjimo gestas

Jūsų klausos aparatas gali palaikyti papildomą naudojimo valdymą. Šį valdiklį klausos specialistas gali sukonfigūruoti taip, kad du kartus bakstelėjus ausį būtų galima paleisti ir sustabdyti vadinamąjį garšą iš 2,4 GHz priedu.

„Edge Mode“

Režimas „Edge Mode“ padeda nustatyti ir sukurti laikinę, realioju laiku atliekamą reguliavimą, pritaikytą sudėtingai aplinkai. Įjungus prietaisai nuskaato aplinką, kad būtų patogiau ir aiškiau. Daugiau informacijos turėsite savo klausos specialisto.

6. GARSUMO VALDYMAS

Jungimo garsumo lygis

Jūsų klausos aparatai klausos specialistas nustatė konkretų garsumo lygį („Volume Home“). Jei garsai yra per garsūs arba per tylūs, kreipkitės į savo klausos specialistą, kad jis patartų ir pakoreguotų.

Garso valdymas spaudžiamu dvipusiu jungikliu **

Jei spaudžiamas dvipusis jungiklis sukonfigūruotas valdyti garsumą, paspaudus viršutinę jungiklio dalį garsumas padidėja, o paspaudus apatinę jungiklio dalį - sumažėja.

Garso valdymas su „Sprinkler“

Jei naudojoto valdiklis sukonfigūruotas kaip garsumo valdymas su „Sprinkler“, kiekvieną kartą, kai įjungiate naudo- tojo valdymą, pasikeičia klausos aparato garsumas.

Toliau naudokite naudojoto valdiklį, kol pasiekiate pageidaujamą garsumą.

PASTABA: Jei nuo paskutinio garsumo keitimo praėjo 10 ar daugiau minučių, garsumas automatiškai sumažės ir tik tada padidės.

Garsumo valdymo indikatoriai

Jūsų klausos specialistas gali įjungti garsinius indikatoriai, kurie nurodo esaną garsumo padėtį.

Garsumo lygis	Tonas
Maksimalus garsumas	5 pyptelėjimai *****
Garsumo laipsnis (-ai)	Trumpas tonas -
„Volume Home“ (Jungiamo garsumo lygis)	3 pyptelėjimai ***
Garsumo laipsnis (-ai)	Trumpas tonas -
Minimalus garsas	Vienas pyptelėjimas •

Mano klausos aparatas sukonfigūruotas su šiuo valdikliu:

☐ Paspauskite ir atleiskite garsumo valdiklį

☐ Paspauskite ir palaikykite garsumo valdiklį

Baterijos indikatoriai ***

Kai baterijos įtampa yra žema, pasigirsta indikatoriai. Nuo išsikrovusios baterijos indikatoriaus iki išsijungimo liko maždaug 30 minučių (faktinis laikas nuo išsikrovusios baterijos indikatoriaus iki išsijungimo gali skirtis priklausomai nuo aplinkos triukšmo lygio ir gaminio naudojimo). Indikatoriai taip pat gal pasigirsti prieš pat baterijai nusitįgiant veikti.

7. NAUDOJIMAS

Atminties keitimas

Jūsų klausos specialistas gali sukurti kelias atmintis jūsų klausos aparate. Šias papildomas atmintis galima pasiekti jungus klausos aparato naudojoto valdiklį.

Jei naudojoto valdiklis yra sukonfigūruotas taip, kad būtų galima keisti atmintį, kiekvieną kartą, kai įjungiate naudojoto valdiklį, klausos aparatą atmintis bus didinama naudojant turimas atmintis.

Atminties indikatoriai

Jūsų klausos specialistas gali įjungti garsinį indikatorių, kuris įsijungs keičiant atmintį. Indikatoriaus pagal numaty- tuosius nustatymus yra atmintį identifiikuojantis balsas.

Nutildymas

Jei įsų klausos aparate sukonfigūruota nutildymo funkcija, ilgai paspaudus ir palaikius naudojoto valdiklį klausos aparatas bus nutildytas. Jei klausos specialistas įjungė šią funkciją, prieš įsijunant klausos aparato garą galite išgirsti indikatorių. Norėdami įjungti klausos aparato garą, dar kartą paspauskite mygtuką ir garsas bus įjungtas.

BICROS balanso kontrolė ***

Naudojoto valdikliu imtuvu taip pat galite reguliuoti klausos aparato ir siųstuvo balansą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „CROS/BICROS technologija“.

„Multiflex Tinnitus“ lygio kontrolė
Naudojoto valdikliu taip pat galite reguliuoti „Multiflex Tinnitus“ dirgiklio lygį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Multiflex Tinnitus“ technologija.

Sveikatingumo balas

Jūsų klausos aparatas gali turėti jutiklį, kurio galima stebėti aktyvumą ir įsitraukimą bei pranešti apie tai programėle „Thrivr“. Galite lengvai peržiūrėti ir bartyti informaciją apie savo sveikatą ir kasdien gauti grįžtamąją informaciją apie savo pažangą, peržiūrėdami „Thrivr“ sveikatingumo balą.

Krypties nustatymai

Jūsų klausos aparatas turi kryptinius mikrofonus, kurie padeda geriau suprasti kalbą triukšmingose situacijose. Pasitelkukite savo klausos specialisto apie konkrečius kryptinius nustatymus.

8. TELEFONO NAUDOJIMAS

Jūsų klausos aparatai gali būti pritaikyti su funkcijomis, padedančiomis veiksmingai bendrauti telefonu. Paklauskite savo klausos specialisto apie sprendimus dėl telefono.

Automatinė telefono atmintis

Sus parinkty automatiškai įjungia telefono atmintį, kai naudojamas su klausos aparatu suderinamas telefonas. Norėdami naudotis, uždėkite telefono aparatą ant ausies, kaip įprastai, ir klausos aparatas automatiškai pasirinks telefono atmintį. Gali prireikti šiek tiek pajudinti telefono imtuvą, kad būtų rastas geriausias priėjimas. Nuėmus telefono aparatą nuo ausies, klausos aparatas persijungs į paskutinę telefono atmintį.

PASTABA: Pasirinkusiuokite su klausos specialistu, jei klausos aparatas automatiškai neperjungia telefono atminties, jei ji jungta.

Rankinė telefono atmintis ir rankinė telefono ritė

Rankiniu būdu galima perjungti klausos aparatą į telefono arba telefono ritės atmintį. Paklauskite savo klausos specialisto, kurią atmintį turėtumėte naudoti, kad galėtumėte naudotis telefonu.

Bendras telefono naudojimas

Kai kurie klausos aparatai geriausiai veikia laikant telefoną arti ausies, bet ne visiškai ją užengus. Kai kuriais atvejais, jei atsiranda švilpimas (grįžtamasis ryšys), pakreipkite imtuvą kampu, kol švilpimas liausis. Be to, klausos aparatas, esantis kitoje ausyje (be telefono), gali būti prijungtas į telefono nustatymą, kad būtų sumažinti foniniai garsai.

Klausos specialistas gali pateikti instrukcijas ir metodus, atitinkančius jūsų konkrečius poreikius.

Telefono transliavimas iš vienos ausies į kitą ausį

Kai kurie klausos aparate esančioje telefono atmintyje gali būti įrengta telefono transliavimo iš ausies į kitą ausį parink- tis. Jvedus telefono atmintį, telefono garsas bus transliuojamas iš ausies su telefonu klausos aparatą ir priėjingos ausies klausos aparatą. Taip galėsite girdėti telefono pokalbį abiem ausimis. Ape konkrečius telefono nustatymus turėsite savo klausos specialisto.

9. CROS/BICROS TECHNOLOGIJA

Įvadas ***

Kontralateralinė signalų nukreipimo sistema (CROS) - tai klausos aparatas, naudojamas vienpusiam klausos praradimui gydyti. Šis prima garšą iš blogiau girdinčios ausies ir perduoda jį geriau girdinčiai ausi. CROS prima garšą tik iš ausies, kuriai nesuteikiama pagalba, o BICROS prima garšą iš abiejų ausų. Tai padeda pacientui

naudoti už įsų šalies ar regiono ribų. Žinokite, kad veikimas tapatūrinųjų keliųniū metu gali sukelti trūkdužj kitiems elektroniniams prietaisams arba kitų elektroniniai prietaisai gali sukelti trūkdužj jūsų klausos aparatams.

Pagal teisės aktus privalome pateikti šiuos įspėjimus:

ĮSPĖJIMAS: Reikėtų vengti naudoti beklaidžius klausos aparatus tiesiai šalia kitos elektroninės įrangos, nes tai gali lemti netinkamą veikimą. Jei tokie naudotojas yra būtinas, atkreipti dėmesį į tai, ar klausos aparatai ir kita įranga veikia normaliai.

ĮSPĖJIMAS: Naudojant priedus, sudedamąsias dalis ar atsargines dalis, išskyrus tas, kurias pateikė klausos aparatų ge- mintojos, gali padidėti elektromagnetinis spinduliuavimas, sumažėti elektromagnetinis atsparumas ir pablogėti veikimas.

ĮSPĖJIMAS: Jei neįsijungia radijo dažnų ryšio įranga naudojama arčiau nei 30 cm nuo klausos aparato, gali pablogėti klausos aparato veikimas. Jei taip atsitiktų, pasitarkite su savo įrenginiu.

NEATIDARYKITE KLAUSOS APARATO AR ĮKROVIKULI, VIDUJE NĖRA NAUDOOTOJO APARTNAUJAMŲ DALIŲ
Standartinis įkroviklis turi P 21 klasię pagal IEC 60529. Tai gali, kad įrenginys apsaugotas nuo kietų daiktų, didesnių nei 12 mm, pavyzdžiui, pirštų, ir krintančių vandens lašų, pavyzdžiui, kondensato.

„Starkey Hearing Technologies“ įkroviklio tarnavimo laikas - 3 metai.

Būtiną informaciją apie klausos aparatą

Toliau pateikiama paprasta informacija, atitinkanti JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) reikalavimus:

SVARBUS PRANEŠIMAS BŪSIMIEMS KLAUSOS APARATŲ NAUDOTOJAMS

Gera sveikatos praktika reikalauja, kad klausos audimo turintys asmuo, prieš įsigydamas klausos aparatą, atliktų licencijuotą gydytojo (pageidautina gydytojo, kuris specializuojasi ausų ligų srityje) medicininį įvertinimą. Licencijuoti gydytojai, kurie specializuojasi ausų ligų srityje, dažnai vadina otolaringologais arba otologais. Medicininio įverti- nimo tikslas - užtikrinti, kad prieš įsigyjant klausos aparatą būtų nustatytos ir gydymos visos mediciniškai gydymos ligos, galinčios turėti įtakos klausai.

Po medicininio įvertinimo gydytojas jums pateiks raštišką pažymą, patvirtinančią, kad jūsų klausos praradimas bus mediciniškai įvertintas ir kad galite būti laikomas kandidatu gauti klausos aparatą. Gydytojas nukreips jus pas audiologą arba klausos aparatus išduodantį specialistą, kad būtų įvertintas klausos aparato tinkamumas.

Audiologas arba klausos aparatų platintojas atliks klausos aparato įvertinimą, kad įvertintų jūsų gebėjimą girdėti su klausos aparatu ir be jo. Atlikęs klausos aparato įvertinimą audiologas arba klausos aparatus išdavimo specialistas gaus paraiškį ir pritaikytą klausos aparatą pagal jūsų individualius poreikius.

Jei abejojate, ar sugėbėjėte prisitaikyti prie stiprintuvų, turėtumėte pasitarti su, ar galima pashaudoti bandomosios naujas ar pirmo pasirinkimo programa. Daugelis klausos aparatų platintojų dabar siūlo programas, pagal kurias už simbolinį mokeskį tam tikrą laiką galite nešioti klausos aparatą, o po to galite nusipirkti, ar norite įsigyti klausos aparatą.

Pagal federalinius įstatymus klausos aparatai parodojami tik tiems asmenims, kurie yra gavę licencijuotą gydytojo medicininį įvertinimą. Federalinis įstatymas leidžia pilnei informacijai naušausiam asmeniui pasirašyti pareiškimą dėl atsisakymo atlikti medicininį įvertinimą dėl religinių ar asmeninių įsitikinimų, kurie neleidžia konsultuotis su gydytoju. Toks atsisakymas neatitinka jūsų sveikatos intereso, todėl jo naudotis griežtai nerekomenduojama.

Klausos aparatas neatkaria normalios klausos ir neužkerta kelio ar neapagerina klausos sutrikimų, atsiradusių dėl organų ligų. Klausos aparatai naudojami yra tik dals klausos habilitacijos, jai gali patekti papildyti klausos mokymu ir skaitymo iš lūpų mokymu. Daugeliu atvejų retas klausos aparato naudojimas neleidžia naudotojui gauti visapusiškos naudos.

Renkantis ir pritaikant klausos aparatą, turio didžiausias garso slėgio lygį versija 132 decibelus, reikia būti ypąč atsargiems, nes gali kilti pavojus, kad sutriks likusi klausos aparato naudojtoja klausos.

Kai kurie klausos aparatai naudojami pranešė, kad naudotais mobiliojiu telefonu jų klausos aparate girdimas dūžgimas, o tai reikšia, kad mobilusis telefonas ir klausos aparatas gali būti nesuderinami. Pagal ANSI C63.19 standartą (ANSI C63.19-2007 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility of Wireless Communications Devices and Hearing Aids) konkretus klausos aparato ir mobiliojo telefono suderinamumą galima numatyti prie mobiliojo telefono skleidžiamas spinduliuoties įvertinimo pridedus klausos aparato atsparumo įvertinimą. Pavyzdžiui, sudėjęs klausos aparato įvertinimą 2 (M2/T3) ir telefono įvertinimą 3 (M3/T3), gautas bendras įvertinimas, lygus bent 5, užtikrinių „normalų naudojimą“ bendras įvertinimas, lygus 5 ar daugiau, reikščių „puikų veikimą“. Tikslų savo klausos aparato M/T kategoriją rasite kartu su klausos aparato pateiktame draugijos vadove.

KLAUSOS NEGALIA TURINTYS VAIKAI

Klausos sutrikimų turintį vaiką reikia ne tik apžiūrėti pas gydytoją, bet ir nukreipti pas audiologą, kad šis įvertintų ir reabilituotų, nes klausos sutrikimai gali sukelti kalbos raidos ir vaiko mokymosi bei socialinių problemų. Audiologas pagal išsivienimą ir patirtį yra kompetentingas padėti įvertinti ir gydyti klausos sutrikimų turintį vaiką.

ĮSPĖJIMAS: Jūsųgus maksimali išvesties lygis ir dėvėti ilgai nei nurodyta laiko, garso energijos poveikis pacientui gali viršyti triukšmo poveikio ribines vertes. Šis prietaisas skirtas naudoti ne ilgiau kaip šešiolika (16) valandų per dieną, kai jungtams maksimalios išvesties lygis.

Pacientui

Spengimo ausyse terapijos prietaisais - elektroninis prietaisais, skirtas pakankamą intensyvumo ir dažnių juostos plotų triukšmui sukurti, kad būtų galima gydyti spengimą ausyse. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip pagalbiniė priemonė išoriams garsams ir kalbai girdėti.

„Multiflex Tinnitus“ technologija yra įrankis garsams generuoti. Šis priemonė rekomenduojama naudoti kartu su atitinkamomis konsultacijomis ir (arba) pagal spengimo ausyse valymo programą, kad palengvėtų pacientų, kenčiančių nuo spengimo ausyse, būklė.

SPENGIMO AUSYSE TERAPIJOS SAVOKOS IR NAUDA

„Multiflex Tinnitus“ technologija gali būti naudojama kaip spengimo ausyse gydymo programos dalis. „Multiflex Tinnitus“ technologija per klausos aparatą atkaria baltąjį triukšmą. „Multiflex Tinnitus“ technologija yra užprogramuota pagal jūsų klausos praradimą ir pageidavimą, o klausos specia- listas gali pakeiguroti „Multiflex Tinnitus“ technologijos nustatymus, kad bei atitiktų jūsų poreikius. „Multiflex Tinnitus“ technologija gali laikinai palengvinti spengimą ausyse.

NAUDOTI TIK SU IŠRAŠYTŲ RECEPTŲ

ĮSPĖJIMAS: Naudojant bet kokią garšą generuojantį spengimo ausyse gydymo prietaisą gali kilti tam tikrų problemų. Tarp jų - galimas spengimas ausyse, galimas klausos slenkisčių pokytis ir galimas odos sudirginimas sąlyčiu su klausos aparatu vietoje.

„Multiflex Tinnitus“ technologija sukurta siekiant sumažinti šias problemas. Tačiau, jei pajutote ar pastebėjote bet kurią iš pirmiau minėtų būklių, galvos svaigimą, pykinimą, galvos skausmą ar širdies peršūsimai, nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į gydytoją, audiologą ar kitą klausos specialistą.

Kaip ir bet kuri kita priemonė, netinkamai naudojant spengimo ausyse terapijos priemonę, gali atsirasti tam tikras potencialiai žalingas poveikis. Reikėtų pasiprūpinti, kad prietaisas nebūtų naudojamas be leidimo ir kad būtų laikomas vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamas vietoje.

„TINNITUS“ TECHINIAI DUOMENYS

„Multiflex Tinnitus“ technologija. Didžiausias galinumas = 87 dB SPL (tipinis), matuojant 2cc jungtini pagal ANSI S3.22 arba IEC 60118-7.

ĮSPĖJIMAI:

Jei produktas karštas, nesielskite jo, kol neatvės. Jei produktas neveikia, jo neišdarykite. Dėl šoko pavojus, prašome atsisūsti remontui. Laikykite tol, kui nauki. Neparykate nieko iš paketo, išimkite džiuviklį, valymo įrankį ir pan. Bet kokie laidai ir AC adapteriai turi būti patvirtinti arba išvardyti Nacionaliniame Bandyimų Laboratorijų Šaraše.

TINKAMA NAUDOTŲJŲ KLAUSOS PRARADIMAMS

Jrenginiai yra pritaikyti vartotojų klausos praradimams, o vartotojai pastebi nuoseklį naudą iš amplifikacijos, atitinkančios normatyvinius duomenis. Nerekomenduojama naudoti prietaisų ar ausų įrenginių, kurie gautų sukelti vartotojų miri arba rimta sveikatos būklės pablogėjimą. ARBA gautų tai padaryti pasikartojus.

NEATIDARYKITE KLAUSOS APARATO, VIDUJE NĖRA NAUDOOTOJO PRIENAMŲ DALIŲ. NAUDOJIMAS TIK PAGAL RECEPTĄ.

BEKLADŽIO RYŠIO TECHINIS APRAŠYMAS

Jūsų klausos aparatai turi radijo imtuvo naudojimo „Bluetooth® Low Energy“ bekladžio ryšio technologiją, veikiančią 2.4-2.4835 GHz dažnių juostoje su maksimalia efektyvia išspinduliuojama galia - 8 dBm (mRIC R), -6.2 dBm (RIC RT), naudojant GFSK perdavimo moduliaciją. Imtuvo sklyrus radijo įrenginyje turi 1.5 MHz juostos plotį. RIC RT taip pat turi radijo imtuvą, naudojantį artiniojo lauko magnetinę indukciją, veikiančią 10.281 MHz dažniū su maksimalia indukuota magnetinio lauko stiprumu - 5 dBuV/m, matavimo atstumu 10 metrų su 8-DPSK perdavimo moduliacija. NFM radijo RIC RT imtuvo sklyrus turi 400 kHz juostos plotį. Šis klausos aparato modelis buvo išbandytas ir išlaikė šiuos išsky- rimo ir imuniteto bandymus: IEC 60601-1-2 spinduliuojamų įrenginių reikalavimai 1 grupės B klasės įrenginių, kaip nurodyta CISPR 11. RF spinduliuojamas imunitetas lauko lygtyje 10 V/m tarp 80 MHz ir 2.7 GHz, taip pat aukštesni lauko lygiai nuo ryšio įrenginių, kaip nurodyta 9 lentelėje IEC 60601-1-2. Imunitetas elektros dažnio magnetiniais laukams lauko lygtyje 30 A/m, taip pat artimųjų magnetinio laukų, kaip apibrėžta 11 lentelėje 60601-1-2. Imunitetas ESD lygiams +/8 kV vedamojo iškrovimo ir +/- 15 kV oro iškrovimo.

Numatomas tarnavimo laikas yra 3 metai.

ES NEPALANKIŲ ĮVYKIŲ PRANEŠIMAS

Bet koks rimtas įvykis, susijęs su jūsų „Starkey“ įrenginiu, turėtų būti praneštas jūsų vietiniam „Starkey“ atstovui ir kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje esate įsisteję. Rimtas įvykis apibrėžiamas kaip bet koks gedimas, charakteristinis ir (ar) veikimo pablogėjimas arba netinkamas naudojimo vadovė/etikečių, kuris gautų sukelti vartotojų miri arba rimta sveikatos būklės pablogėjimą. ARBA gautų tai padaryti pasikartojus.

FCC Informacija

Šis įrenginiai atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir ISED Kanados licencijos nereikalaujančias RSS standartus. Veikia priklauso šiu šiu dviejų sąlygų: (1) įrenginys negali sukelti kenksmingo triukšio, ir (2) Šis įrenginys privalo priimti bet kokią gautą trikį, įskaitant trikdį, galintį sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. PASTABA: Gamintojas neatasko už jokius radijo ar televizijos trikdžius, sukelčius šios įrangos neleidžiamais pakeitimais. Tokių pakeitimų atitikimas gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą. Šiuo metu „Starkey Laboratories, Inc.“ pareiškia, kad RIC 312 ir Mric R/VIC RT atitinka būtinuosius reikalavimus ir kitas svarbias 2014/53/ES Direktyvos nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima gauti nurodytu adresu arba iš docs.starkeyhearingtechnologies.com. „Starkey Laboratories, Inc.“ taip pat pareiškia, kad RIC 312 ir Mric R/VIC RT atitinka JC radio įrangos reglamentus ST 2017, kaip pakeista. JC atitikties deklaracijos kopiją galima gauti iš toliau nurodyto adresu ir iš docs.starkeyhearingtechnologies.com.

REGLAMENTUOTA INFORMACIJA

Dėl aptarnavimo ar remonto kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą. Jei reikia, galite siųsti savo klausos aparatus į:

 EC REP	UK Authorised Person: Starkey UK
Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 USA www.starkey.com	Starkey Laboratories (Germany) GmbH William F. Austin House Pepper Rd, Hazel Grove Stockport SK7 5BX, UK www.starkey.co.uk

 EC REP	UK Authorised Person: Starkey UK
Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 USA www.starkey.com	Starkey Laboratories (Germany) GmbH William F. Austin House Pepper Rd, Hazel Grove Stockport SK7 5BX, UK www.starkey.co.uk

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

- Laikykite ausuose vietoje
- Į klasės med. priemonė

Nurodymai, kaip užtikrinti saug elektronika.

„Starkey Laboratories, Inc.“ skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. Kompanija „Apple“ neatasko už šio prietaiso veikimą ar jo atitikį saugos ir reguliavimo standartams.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „App Store“ yra Apple Inc. „prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

Starkey Laboratories, Inc. • skatina, ES reikalauja, o jūsų vietos bendruomenės įstatymai gali reikalauti, kad jūsų klausos aparatai būtų užtikrinti per baterijos elektros perdavimo/uitalizavimo procesą. Naudojant perdavimo/uitalizavimo personalui, prašome išimti cinko oro vėdinį skyrius pagal nurodymus baterijų skyriuje prieš perdirbant. Be to, prašome įtraukti šį naudojto vadovą, kai užtikrinote savo klausos aparatus.

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys bendrovei “Bluetooth SIG, Inc.”, ir „Starkey“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

„Thrive“ ir „Starkey“ yra „Starkey Laboratories, Inc.“ prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiskia, kad priedas buvo sukurtas kompanijai prijungti prie ženklinėje nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ų), o kūrėjas patvirtino